



PHAGO

PHAGO'SPRAY DASR 70



Loputamist mittevajav käte ja pindade hüdroalkohoolne desoaine



- Lai mikroobivastane toimespekter alates 30 s
- Toiduga kokku puutuvatele pindadele, ei vaja loputamist
- Kuivamisel ei jäta jälgi ega jääke

KASUTAMINE

PHAGO'SPRAY DASR 70 on hüdroalkohoolne desoaine käte, pindade, seadmete ja puhta mööbli desinfitseerimiseks. Ei jäta pindadele jälgi ega jääke. Seda saab ühekordselt kasutatava pühkepaberiga kanda kiireks desinfitseerimiseks väikestele mööbliesemetele, kärudele, mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete (operatsioonilaua, operatsioonivalgustite, monitoride, refleksihaamrite, vererõhümõõturite) välispindadele ja patsiendi lähedal olevatele väikestele pindadele.

PHAGO'SPRAY DASR 70 on ilma loputamiset kasutatav pindadel, mis võivad sattuda vahetusse kokkupuutesse toiduga (lauad, tööpinnad, kandikud, toidukärud, viilutajad, peenestid, noad jne).

KOOSTIS

Desinfektandid:

Etüülalkohol (CAS-nr 64-17-5, 72 massi%).

Koostises on ka: vesi, isopropanool, tertbutanool, sorbiinhape.

96% kõigist koostisainetest on loodusliku päritoluga.

OMADUSED

Välimus: läbipaistev värvitu vedelik

Lõhn: alkoholi lõhn

pH (20 °C): 4,0–7,0

KASUTUSJUHEND

PHAGO'SPRAY DASR 70 on kasutusvalmis.

Pihustada ühekordselt kasutatavale lapile ja kanda desinfitseeritavale pinnale.

Mitte loputada.

Pihustada otse eelnevalt puhastatud pinnale 20-30 cm kauguselt koguses 15 kuni 20 ml/m².

Jätta pinnale kaheks minutiks (täieliku desinfitseerimise efekti saavutamiseks) või vastavalt vajadusele. Pealekandmissagedus: vt ettenähtud hügieenikava.

TL1: inimeste hügieeniks ettenähtud biotsiid.

TL2: desinfektant pindadele, materjalidele, sisseseadele ja mööblile, mis ei puutu otseselt kokku toiduainete või söödaga.

TL4: desinfektant toiduainetega kokku puutuvate pindadele.

MIKROOBIVASTANE TOIME

TOIMEAEG

<u>Bakterivastane toime</u>	EN 1276	30 s
	EN 13727+A2	30 s
	EN 13697, millest <i>L. monocytogenes</i> ja <i>S. enterica</i>	2 min
	EN 16615	1 min
	EN 17387	2 min
<u>Seenevastane toime</u>	EN 1500 (3mL)	30 s
	EN 1650	1 min
	EN 13624	1 min
	EN 13697+A1	1 min
	EN 16615	2 min
<u>Mükobakterivastane toime</u>	EN 17387	2 min
	EN 14348	1 min
<u>Viirusevastane toime</u>	EN 14476+A2: poliovirus	1 min
	EN 14476 +A2: adenoviirus ja noroviirus	30 s
	EN 16777: adenoviirus ja noroviirus	1 min

ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL

Ohtlik. Ainult kutsealaseks kasutuseks.

Ohutuskart on saadaval nõudmisel.

Tuleb järgida ettevaatusabinõusid. Biotsiide tuleb kasutada ettevaatlikult. Enne kasutamist tuleb läbi lugeda märgistus ja tooteteave. Eriti kohtades, kus sageli viibib inimesi, tuleb enne kasutamist veenduda, et see on hädavajalik. Kus iganes võimalik, tuleb kasutada muid meetodeid ja tooteid, mis on inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale kõige vähem ohtlikud.

Standardile ECOCERT (<http://detergents.ecocert.com/en>) vastava ECOCERT Greenlife sertifikaadiga pesuaine.

TOOTEKOODID

SA0140980	6 x 750 ml
SA0140990	2 x 5 l
SA0141000	10 l (pole Ecocerti sertifikaati)

LISATEAVE JA DETAILARUANNE: VT TEADUSLIK TOIMIK

Ver 11/2023



CHRISTEYNS

MEDICAL CARE

Christeyns Eesti OÜ • Purila, Härgla tee 6, Raplamaa 79633 • tel: 6772164

www.christeyns.com